

CONCEPTION, FABRICATION, COMMERCIALISATION : DU 100 % FRANÇAIS !



SERVICE CONSOMMATEURS

Appelez-nous au :



0 969 320 966

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h



Écrivez-nous à :

services.consommateurs@sigvaris.com

Nos recommandations

► **Lavez les produits avant la première utilisation et quotidiennement.**

► **N'utilisez pas les produits sur une peau lésée.**


► Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale.

► Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.

► Ne réalisez pas de modification sur le produit.

► Privilégiez l'utilisation de crème hydratante avant le coucher plutôt que le matin avant l'enfilage des produits car elle peut les endommager.

POUR ENFILER VOTRE PRODUIT

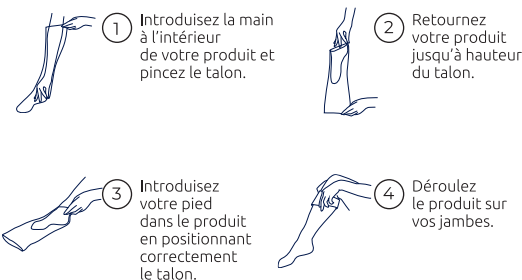

Astuce pour le collant :

Enfilez une jambe après l'autre jusqu'au genou, puis jusqu'à mi-cuisse. Positionnez ensuite le produit au niveau de l'entrejambe et terminez en remontant la ceinture sur le ventre.

LES TRUCS EN +

PENSEZ-Y ! Massez vos jambes de bas en haut, afin de bien répartir le textile et favoriser le retour veineux. Bien en place, votre produit est plus efficace !

ROLLY, une solution unique d'aide à l'enfilage et au retrait des produits. Demandez conseil à votre professionnel de santé.



Retrouvez notre technique d'enfilage et la présentation du produit Rolly en vidéo sur notre site www.sigvaris.com ou flashez ce code



LA VIE DE VOS PRODUITS



Lavez en machine,
programme délicat
à 30°C.



N'utilisez pas
d'assouplissant.



Séchez loin
de toute source
de chaleur.

► Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.

► Le respect des conditions d'utilisation et d'entretien indiquées dans cette notice, permet aux produits de compression médicale Dynaven d'assurer leur performance pendant 6 mois minimum.

Indications

► **Bas de compression médicale entre 10 et 15 mmHg (entre 13 et 20 hPa, classe I)**

- Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
- Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

► **Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)**

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thromboembolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

► **Bas de compression médicale entre 20,1 et 36 mmHg (entre 27,1 et 48 hPa, classe III)**

- Varices de plus de 3 mm (C2).
- Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
- Œdème veineux chronique (C3).
- Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).

- Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).
- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

► **Bas de compression médical supérieure à 36 mmHg (au-dessus de 48 hPa, classe IV)**

- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de l'ulcère actif (C6) jusqu'à cicatrisation complète.
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

*Notice d'utilisation incluse

DYNAVEN




Guide pratique de
la compression*

Un savoir-faire reconnu

Au sein de SIGVARIS GROUP nous pensons qu'il est fondamental d'avoir le bon partenaire santé à ses côtés. C'est pourquoi nous nous employons à proposer un ensemble de solutions complémentaires, couvrant toutes les exigences en matière de compression.

Nos offres reposent sur des marques répondant à des besoins distincts et à des pathologies différentes (insuffisance veineuse chronique, lymphœdème, thrombose veineuse profonde), et capitalisent sur nos 150 ans d'expertise médicale. Chacune de nos marques a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure solution aux femmes et aux hommes porteurs de compression.

Engagés dans le développement de réponses médicales pertinentes, nous innovons sans cesse pour aider les individus à se sentir mieux. Tous les jours.

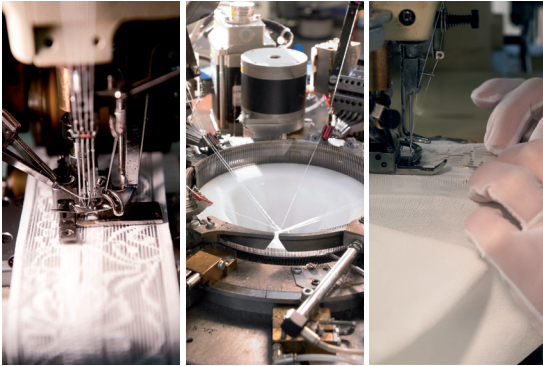

La compression comment ça marche ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques⁽¹⁾.

Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.



EN PRATIQUE

► Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier, sage-femme etc...).

Dynaven, notre gamme fiable et fonctionnelle, adaptée aux morphologies féminines et masculines.

FEMME

semi-opaque

transparent

HOMME

* Existe en pied ouvert

Découvrez nos produits sigvaris

Pour mieux répondre à vos besoins, Sigvaris vous propose une gamme claire, complète et adaptée à chaque situation de vie.

Vous cherchez un produit facile à porter au quotidien ? Un produit adapté à des usages spécifiques ? Trouvez le produit qui vous correspond parmi les Essentiel, Styles ou Active.

Découvrez toute notre gamme Premium sur : www.sigvaris.com

FEMME

HOMME

Les produits de compression médicale Sigvaris, Dynaven et Rolly sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS.

Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

(1) HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010. (2) Présence d'un fil antibactérien à base de verre de phosphate d'argent (Numéro CAS : 308069-39-8). (3) Contient un fil avec traitement antibactérien à base d'argent adsorbé sur dioxyde de silicone. Résistant : 100% de satisfaction après 4 mois de port - Essai Au Porter Chaussette Active Résistant réalisé par SIGVARIS via une communauté de patients administrée par Harris Interactive - 18 porteurs - Décembre 2018. (4) Chaussette : 25% coton, bas auto-fixant : 20% coton.



Suivez-nous également sur

UKRP : SIGVARIS BRITAIN LTD, 1 Imperial Court, Magellan Close, Andover SP10 5NT



© Copyright janvier 2024 by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. Sigvaris, Dynaven et SIGVARIS GROUP are registered trademarks of SIGVARIS AG, CH-9014, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide. SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert - France

